

[放射線防護用カラー] ネックガード用のカバーに
使い捨てタイプ 新登場!

縫い目、縁取りテープからの汗の侵入は、
内装する遮へい材料の硬化・劣化を促進する要因になり得ます

汗を
カット!

不織布製のカバーが、汗を吸収します

さらに、裏面の防水加工によって、
ネックガード本体への汗の付着
および、内部への汗の侵入を抑えます

NG-CVD

/ネックガードカバー(使い捨てタイプ)

規格番号	サイズ	希望小売価格 (円:税抜価格)
NG-CVD	フリー	20,000


材 質：不織布(裏面防水加工処理済み)
枚 数：250枚(50枚/袋×5袋入)
カラー：ブルーのみ

弊社製品 WNG5、MLNG、SLNG との装着確認済み。
その他の製品、他社製品には装着できない可能性もございます。
このカバーに X線防護能力はありません。

清潔に気持ち良く
ご使用いただくために!

ネックガードへの
カバーの装着をお勧めします。


NG-CVD 装着手順

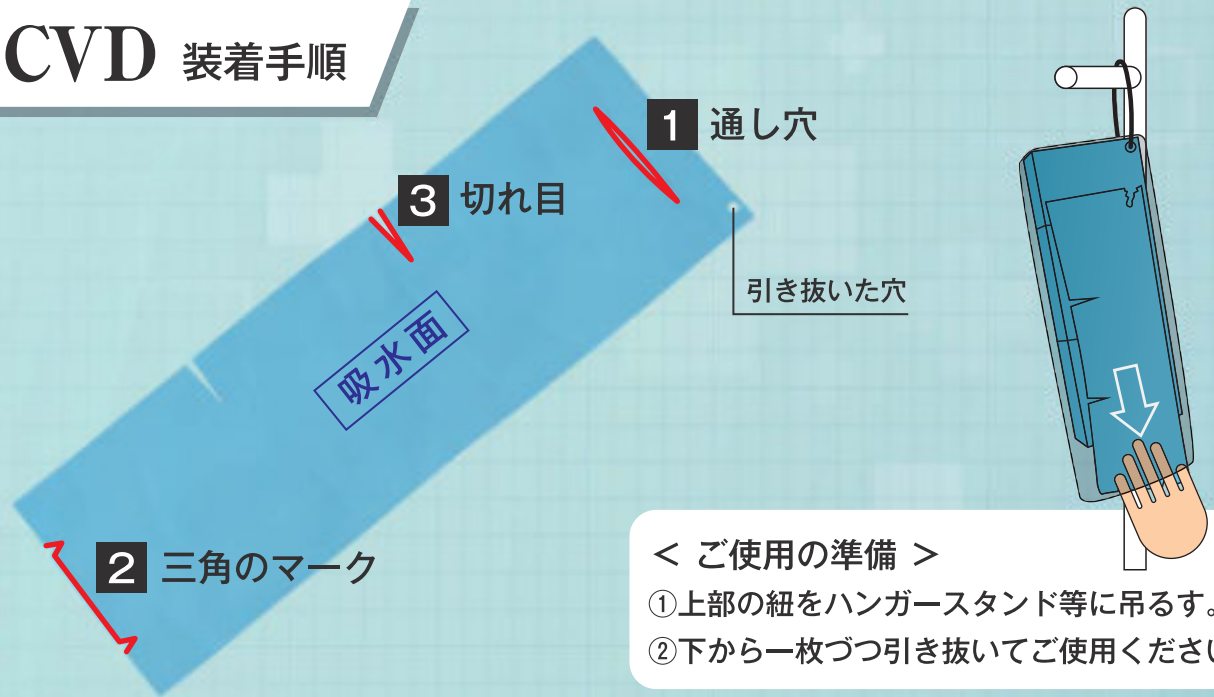

< ご使用の準備 >

- ① 上部の紐をハンガースタンド等に吊るす。
- ② 下から一枚ずつ引き抜いてご使用ください。

<p>手順 1</p> <p>柔らかいマジックテープ</p> <p>合わせる</p> <p>1</p> <p>ネックガード本体の柔らかいマジックテープ側の先を、カバーの〈1通し穴〉に通しマジックテープの縁に合わせる。</p>	<p>手順 2</p> <p>2</p> <p>吸水面</p> <p>ネックガード本体の硬いマジックテープ側の先を、カバーの〈2三角のマーク〉に合わせます。</p>
<p>手順 3</p> <p>3</p> <p>〈3切れ目〉をあご中央に合わせて装着します。</p>	<p>手順 4</p> <p>装着後に手で折り曲げます。</p>

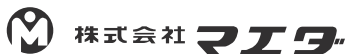

株式会社 **マエダ**

営業部・経理部・工場

〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12

TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9

TEL: 03-3811-7315 E-mail: info@kk-maeda.com

<http://www.kk-maeda.com>

このカタログは、2023年5月現在のものです。

記載の製品は、予告なく仕様その他を変更することがあります。

このカタログの製品はイラストで描かれています。実際の製品と色や形が異なる場合もあります。

イラストで描かれている表面シートのカーボン調を強調しています。

記載価格には、消費税、荷造運送費などの諸経費は含んでおりません。別途申し受けます。

※本カタログの無断転載を固く禁じます。

取扱店